






## Управление креслом пациента

### Панель управления


<b>Кресло в автоматическое положение A</b>	Короткое нажатие		
<b>Спинка вниз</b>	Длительное нажатие		
<b>Кресло в автоматическое положение B</b>	Короткое нажатие		
<b>Спинка вверх</b>	Длительное нажатие		
<b>Кресло в автоматическое положение C</b>	Короткое нажатие		
<b>Кресло вверх</b>	Длительное нажатие		
<b>Кресло в автоматическое положение D</b>	Короткое нажатие		
<b>Кресло вниз</b>	Длительное нажатие		
<b>Кресло в положение сплевывания</b>	Короткое нажатие	когда светодиод ВЫКЛ	
<b>Кресло в предыдущее положение</b>	Короткое нажатие	когда светодиод ВКЛ	
<b>Кресло только в положение сплевывания</b>	Длительное нажатие		

### Кнопка Flexu

Кресло в положение сплевывания



### Педали управления

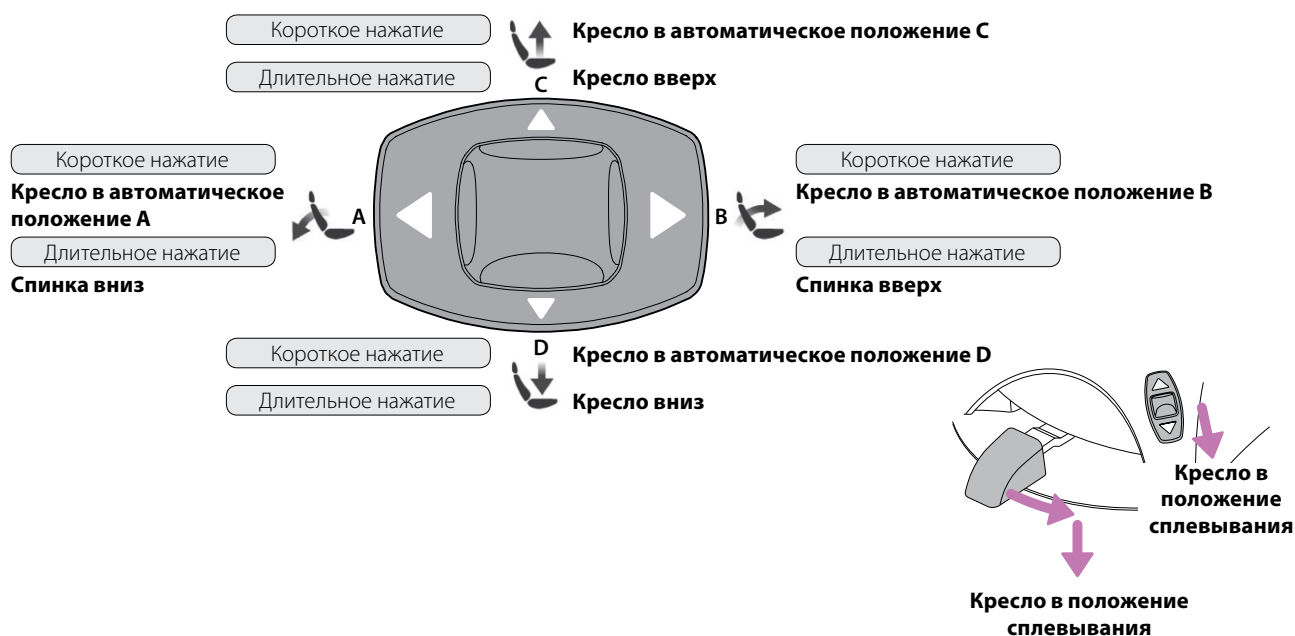

# Управление стоматологической установкой

## Панель управления

**Смыв плевательницы**

Короткое нажатие



**Наполнение стакана и смыв плевательницы**

Два коротких нажатия

**Или**

Удержание 0,5 - 1 сек.

**Наполнение стакана при удерживании нажатой кнопки**

Длительное нажатие

**Открытие двери / вызов ассистента в течение запрограммированного времени**

Короткое нажатие



**Открытие двери / вызов ассистента при удерживании кнопки нажатой**

Длительное нажатие

**Светильник ВКЛ ► ВЫКЛ**

Короткое нажатие



**Яркость светильника**

Длительное нажатие

**Процедура обслуживания**

Короткий цикл промывки

Удержание 3 сек.

Длинный цикл промывки

Удержание 6 сек.



**Педаль управления**

Не активирован инструмент

Короткое нажатие


**Открытие двери / вызов ассистента в течение запрограммированного времени**

Длительное нажатие

**Открытие двери / вызов ассистента при удерживании кнопки нажатой**

**Запрограммированная функция установки**

**Запрограммированная функция установки**

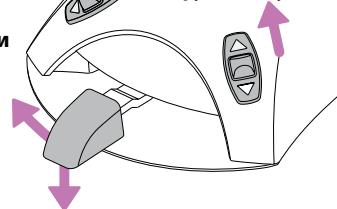

Короткое нажатие

**Смыв плевательницы**

Два коротких нажатия

**Наполнение стакана и смыв плевательницы**













Удержание 0,5 - 1 сек.

**Наполнение стакана и смыв плевательницы**

Длительное нажатие

**Наполнение стакана при удерживании нажатой кнопки**

# Управление инструментами

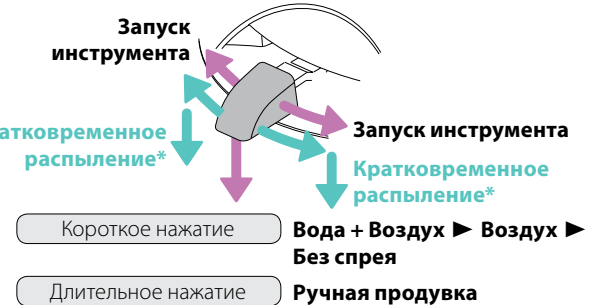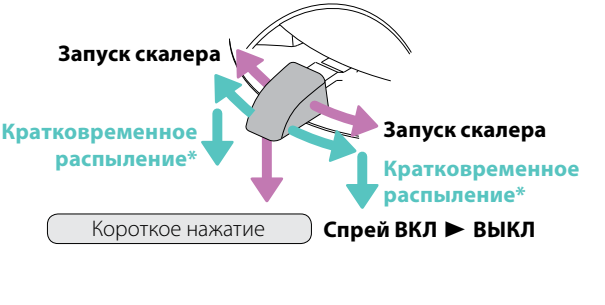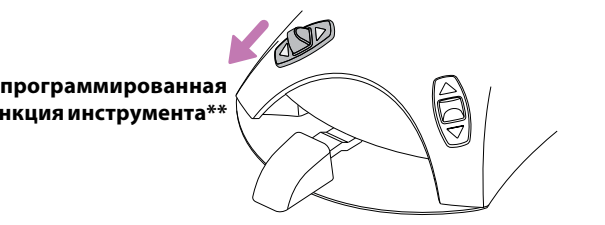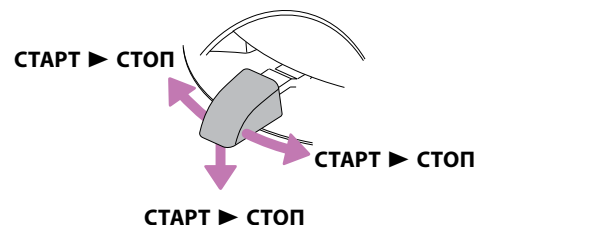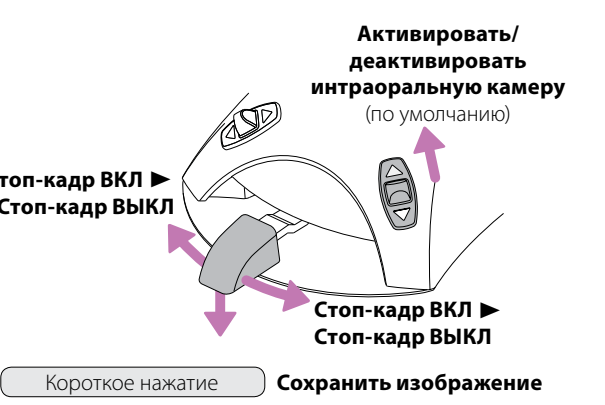Панель управления		Активирован инструмент, управляемый установкой	
<p><b>Микромотор или турбинный наконечник</b></p> <p><b>Автоматическая продувка</b> ВКЛ ► ВЫКЛ</p> 	<p><b>Микромотор или турбинный наконечник</b> Вода + Воздух ► Воздух ► Без спрея</p> <p><b>Скалер</b> Спрей ВКЛ ► ВЫКЛ</p> 		
<p><b>Скалер</b></p> <p><b>Изменение режима работы</b></p> 	<p><b>Турбинный наконечник</b> Быстрый запуск ВКЛ ► ВЫКЛ</p> 		
<p><b>Микромотор</b></p> <p><b>Реверс вращения ВКЛ ► ВЫКЛ</b></p> 	<p><b>Микромотор Bien-Air MCX</b></p> <p>Удержание 2 сек.</p> <p><b>Ограничение скорости вращения</b> ВКЛ ► ВЫКЛ</p> <p>Удержание 4 сек.</p> <p><b>Ограничение крутящего момента</b> 25 % ► 50 % ► 75 % ► 100 % (= ограничение крутящего момента отключено)</p> 		
Педаль управления		Активирован инструмент, управляемый установкой	
<p><b>Микромотор или турбинный наконечник</b> (стандартная педаль)</p>  <p><b>Запуск инструмента</b></p> <p><b>Кратковременное распыление*</b></p> <p><b>Запуск инструмента</b></p> <p><b>Кратковременное распыление*</b></p> <p>Короткое нажатие: Вода + Воздух ► Воздух ► Без спрея</p> <p>Длительное нажатие: Ручная продувка</p> <p><small>*Если активировано техником</small></p>	<p><b>Скалер</b> (стандартная педаль)</p>  <p><b>Запуск скалера</b></p> <p><b>Кратковременное распыление*</b></p> <p><b>Запуск скалера</b></p> <p><b>Кратковременное распыление*</b></p> <p>Короткое нажатие: Спрей ВКЛ ► ВЫКЛ</p> <p><small>*Если активировано техником</small></p>		
<p><b>Микромотор, турбинный наконечник или скалер</b></p> <p><b>Запрограммированная функция инструмента**</b></p>  <p><small>**Может быть изменено специалистом по обслуживанию</small></p>	<p><b>Полимеризационная лампа</b></p> 		
<p><b>Интраоральная камера</b></p>  <p><b>Активировать/деактивировать интраоральную камеру</b> (по умолчанию)</p> <p>Стоп-кадр ВКЛ ► Стоп-кадр ВЫКЛ</p> <p>Стоп-кадр ВКЛ ► Стоп-кадр ВЫКЛ</p> <p>Короткое нажатие: Сохранить изображение</p>	<p><b>Интраоральный сканер</b></p>  <p><b>Активировать/деактивировать интраоральный сканер*</b></p> <p><b>Сгенерировать модель</b></p> <p><b>Выбор режима сканирования</b></p> <p>Короткое нажатие: Начать сканирование</p> <p>Длительное нажатие: Получить изображение</p> <p><small>*Если активировано техником</small></p>		


# Программирование

## Панель управления


### Настройки автоматических положений кресла




### Настройки установки

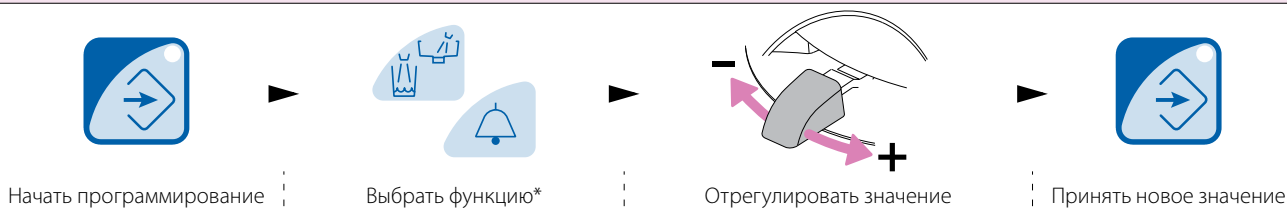

### Настройки светильника Planmeca Solanna

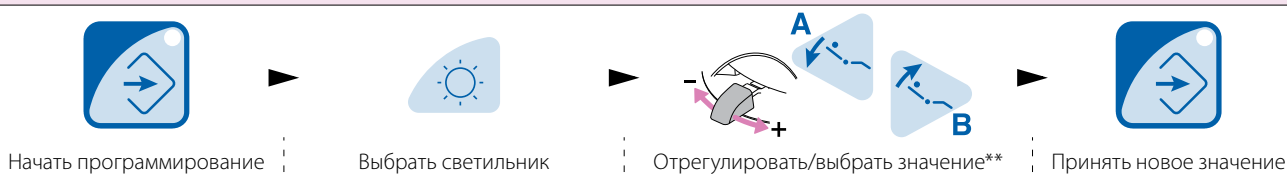

### Настройки инструментов

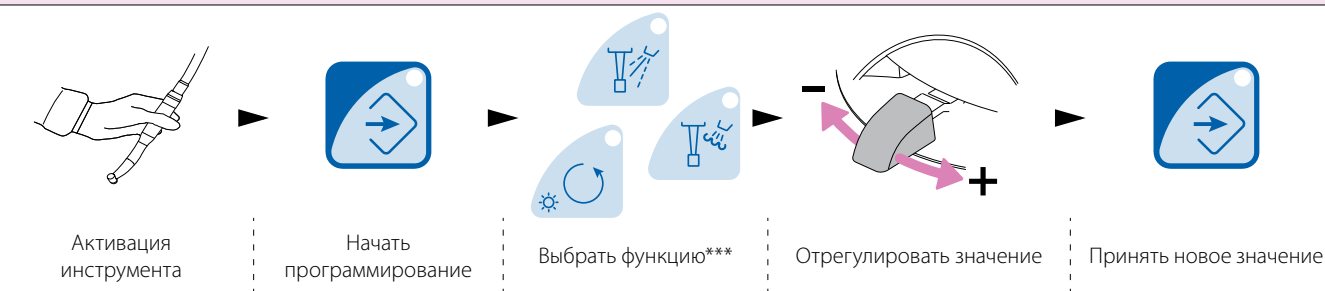

\*Функции установки

	<b>Продолжительность наполнения стакана</b> 2 – 10 сек.		<b>Продолжительность смыва плевательницы</b> 5 – 240 сек.		<b>Продолжительность открытия двери/ сигнала вызова помощника</b> 0 – 250 сек.
--	--	--	--	--	---

\*\*Функции светильника

	<b>Яркость</b> 30–100 %		<b>Белый свет</b> Теплый > Нейтральный > Холодный		<b>Максимальная яркость</b> Мягкий > Сильный > Яркий
--	----------------------------	--	--	--	---

\*\*\*Функции инструментов

	<b>Поток водяного спрея</b> 0 (ВЫКЛ) – F=100 (ПОЛНЫЙ)		<b>Поток продувки воды</b> 0 (ВЫКЛ) – F=100 (ПОЛНЫЙ)		<b>Яркость лампы инструмента</b> L. oFF (ВЫКЛ), 70 – 100%
	<b>Поток воздушного спрея</b> 0 (ВЫКЛ) – F=100 (ПОЛНЫЙ)		<b>Поток продувки воздуха</b> 0 (ВЫКЛ) – F=100 (ПОЛНЫЙ)		<b>Яркость полимеризационной лампы</b> 5 – 100 сек.

Для получения более подробных инструкций, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя. Авторское право Planmeca. Права на изменения защищены.