



Процедура установки

1. Вставьте USB-флеш-карту ⑧ в ПК ⑨. Скопируйте установочный пакет на жесткий диск и дважды щелкните для запуска установки.
2. После установки программного обеспечения настройте сканер ①, следуя инструкциям на сканере ① и ПК ⑨.
3. Подключите сканер ① к калибратору ②, раздвигая щелчок, а индикатор калибратора загорится зеленым. Откройте программное обеспечение для калибровки сканера.
4. После калибровки извлеките калибратор ②. Подключите насадку ⑤ к сканеру. Когда индикатор загорится зеленым, создайте новый заказ на сканирование.

Меры предосторожности

1. Во время калибровки корпус сканера должен быть полностью вставлен в калибратор и располагаться в горизонтальной плоскости.
2. Чтобы сохранить внутреннюю часть в чистоте, когда калибратор не используется, следует устанавливать пылезащитный колпачок ⑦.
3. Более подробная информация приведена в Руководстве пользователя.